



TalkTools : thérapie du positionnement oro-facial

Maîtrise de l'Infection et Stérilisation des Ustensiles de la Thérapie TalkTools

Renseignements supplémentaires :

www.eg-training.co.uk
info@eg-training.co.uk
01530 274747 / 01530 274754

June 2013

Introduction

A quelques exceptions près, tous les ustensiles TalkTools peuvent être stérilisés pour l'utilisation par des clients multiples. Cette brochure vous donne des indications sur les principales opérations de stérilisation et sur les ustensiles qui devraient être traités de manière spécifique. De nouveaux articles sont régulièrement ajoutés à la gamme d'ustensiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un article qui n'apparaît pas dans la liste suivante.

Les thérapeutes qui utilisent les ustensiles pour des clients multiples devraient également vérifier auprès de leur employeur les contraintes liées à la maîtrise de l'infection, le cas échéant.

Usage unique

Les Toothettes et les abaisse-langue en bois ne devraient être utilisés qu'une fois, puis jetés.

Usage avec patient unique

Les sifflets 9, 11 et 12, ainsi que les pailles A/B, C et D peuvent être utilisés à plusieurs reprises, mais seulement par un seul patient.

On ne peut pas laver les sifflets 9, 11 et 12, comme ils comprennent des éléments en papier ou en carton ; on peut essuyer les embouts avec une lingette stérilisante entre les diverses utilisations si besoin. On peut laver les pailles A/B, C et D à la main.

Stérilisation à l'eau froide

C'est la meilleure façon de stériliser la plupart des ustensiles. Utiliser un appareil de stérilisation à froid avec des comprimés ou du liquide adaptés (Milton, par exemple). Veuillez suivre les instructions du fabricant.

Le sifflet 7 peut être stérilisé à l'eau froide mais doit être bien séché à l'intérieur, avec un sèche-cheveux par exemple, pour éviter la rouille des pièces métalliques internes.

Stérilisation par micro-ondes

Vous pouvez stériliser certains ustensiles par micro-ondes, grâce à un appareil de stérilisation à micro-ondes ou des sacs jetables de stérilisation par micro-ondes. Veuillez suivre les instructions du fabricant de l'appareil que vous aurez choisi. A cause des températures élevées impliquées par cette méthode, certains articles peuvent être endommagés.

Les articles suivants peuvent être stérilisés par micro-ondes : embouts Z à vibrations, bloque-lèvres, cuillères marron, cuillères EZ, tri mastique, tubes à mastiquer, masticqueur Ark pour parent/enfant, muscleur de mâchoire, tasse K, tasse à découpe.

Les niveleurs de mâchoire conviennent aussi, mais veillez à retirer les attaches métalliques qui les maintiennent ensemble, comme celles-ci ne conviennent pas aux micro-ondes.

Les lingettes désinfectantes

Vous pouvez essuyer tous les ustensiles avec des lingettes désinfectantes, sauf les sacs de billes sensoriels et les gants-marionnettes (exemple lingettes Clinell).

Autoclave

Les ustensiles Talkools ne sont pas adaptés à cette méthode.

Lavage

Vous pouvez laver en machine les sacs de billes et les gants-marionnettes, sur un programme pour linge délicat ou à froid. Nous recommandons une lessive sans enzymes. Vous pouvez aussi les laver à la main, avec un liquide pour lavage à la main.

Vous pouvez laver à la main tous les articles dans de l'eau chaude et du liquide vaisselle, sauf les sifflets 9, 11 et 12. Les articles lavés de cette façon seront propres, mais pas forcément stériles pour un usage par des patients multiples.

Veillez faire très attention si vous mettez des articles au lave-vaisselle. Certains articles peuvent être endommagés par la température de lavage. Par mesure de sécurité, veillez à ne laver au lave-vaisselle que les articles qui conviennent au nettoyage par micro-ondes.

Bestioles à vibreurs ou à pailles

Vous pouvez essuyer les bestioles à vibreurs ou à pailles avec des lingettes stérilisantes. Les têtes des bestioles se dévissent et peuvent être stérilisées à l'eau froide. Veuillez ne pas plonger la bestiole en entier dans l'eau, ni la placer au micro-ondes ou au lave-vaisselle.

Vibreurs (DN) Z

Vous pouvez essuyer les vibreurs Z et DNZ avec des lingettes stérilisantes. Ils sont démontables et le boîtier peut être stérilisé à l'eau froide. Veuillez ne pas plonger l'ustensile en entier dans l'eau, ni le placer au micro-ondes ou au lave-vaisselle. Ne tentez pas de laver ou stériliser la pile, les ressorts ou le moteur ! Conservez l'emballage de cet ustensile, car il vous aidera à remonter l'appareil correctement.

Pailles

Vous devriez nettoyer l'intérieur des pailles avant de les stériliser, en les passant sous l'eau courante ou en y injectant de l'eau avec une seringue.

Tubes à souffle

Vous pouvez laver les tubes à souffle ou les stériliser à l'eau froide. Pour vous assurer qu'ils sont bien secs à l'intérieur, étirez le tube et accrochez-le pour le faire sécher. Pour accélérer la procédure, étirez-le entièrement et faites-le tourner sur lui-même pour expulser toute l'eau. Veuillez

vous assurer que vous disposez de l'espace nécessaire avant de commencer !

Usure

Comme avec tout équipement thérapeutique, veuillez vérifier vos appareils avant de les utiliser, au cas où des signes d'usure compromettraient leur performance ou créeraient un risque pour l'utilisateur.

Les ustensiles TalkTools ne sont pas conçus pour être utilisés de façon intensive sur le long terme. Ils devront être remplacés périodiquement, selon le degré d'intensité de leur utilisation.

Les renseignements fournis dans cette brochure le sont à titre indicatif. Eg (Training) Ltd ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tout dommage lié aux ustensiles thérapeutiques ou aux appareils de stérilisation pendant la stérilisation des ustensiles TalkTools.